



ISO TECHNOLOGY

CAMILLA DE ALUMINIO TIPO CUCHARA

MARCA: ETMSA

MODELO: YDC-4A

PROCEDENCIA: CHINA

La camilla con cuchara puede ayudar a reducir las lesiones del paciente, permitiendo al personal de primeros auxilios y de los servicios de emergencia asegurar y desasegurar a un paciente de la camilla sin tener que moverlo dentro y fuera de la camilla. Puede ajustarse en función de la altura del cuerpo del paciente y está fabricada con materiales de aleación de aluminio de alta resistencia, lo que la hace ligera, fácil de transportar y utilizar con seguridad, y fácil de esterilizar y limpiar.



Diseñado para fractura de los pacientes

Structure estructura rígida separada se utiliza para transferir pacientes con fisuras y lesiones graves

- Hay dispositivos de embrague en ambos

Extremos para separar la camilla en dos partes


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
- Sin mover al paciente, tire rápidamente al paciente dentro o fuera de la camilla

Bajo el paciente.

- La longitud de la camilla se puede ajustar de acuerdo a la longitud de la persona.

- Estructura de marco estrecho en un extremo (paso a pie) de la camilla.

Tamaño del producto	210*44*7cm
Plegable tamaño	120*44*9cm
Tamaño de embalaje	122*46*11cm
Límite de carga	180kg

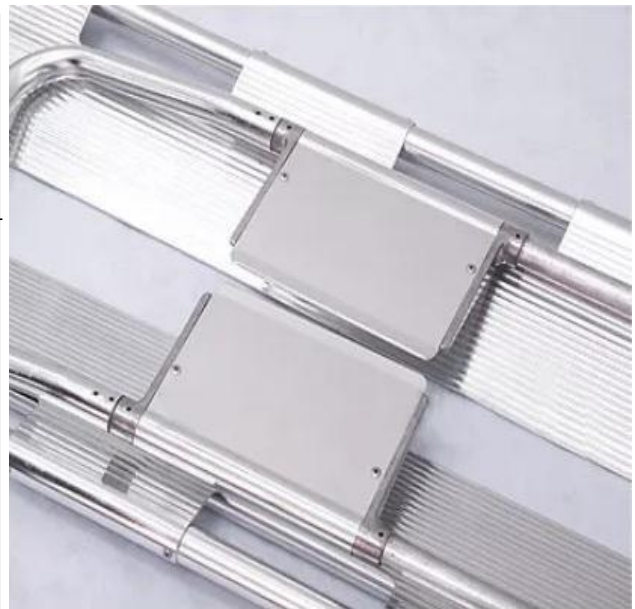

Conveniente Dispositivo de Embrague

Dispositivos de embrague diseñados en ambos extremos de la camilla. La camilla se puede dividir en dos partes.

Práctico dispositivo de ajuste

El diseño del dispositivo de ajuste simple puede ajustar la longitud y doblar






Diseño de mango curvo

El diseño curvo del mango hace que sea cada vez más fácil de levantar sin levantar la mano.

ANALISIS DEL PRODUCTO

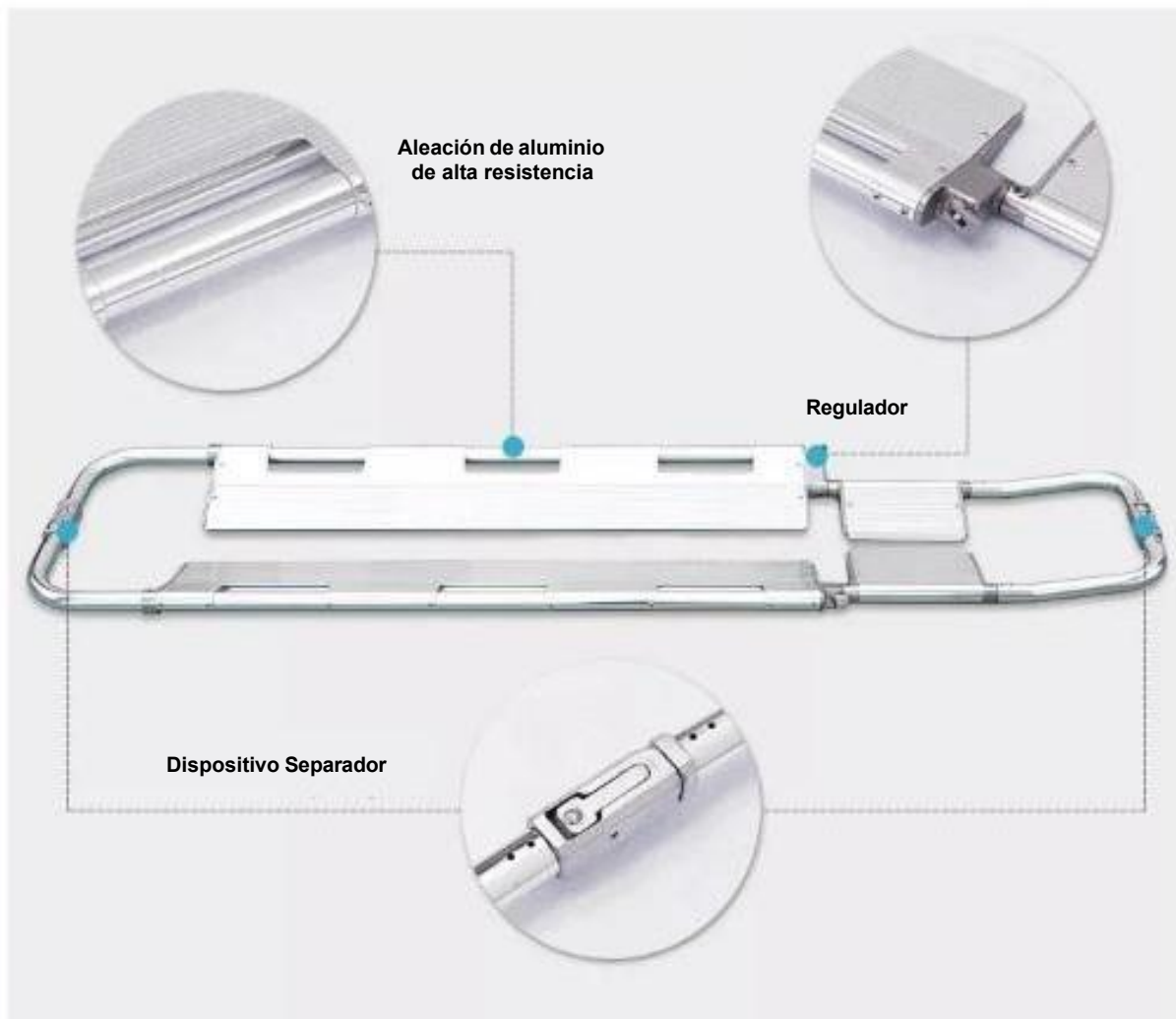

MÉTODO DE OPERACIÓN

Método de Separación



Abrir botón superior



Abrir botón inferior



Separación Exitosa

Telescópico Plegable



Girar hacia abajo



Saque la palanca



Doblado con éxito